

Гідрогелевий пластр «Друга Шкіра» (2nd Skin)

Тісне взуття часто натирає п'яти та пальці, хода стає не впевненою, та й настрій від цього погіршується. Рани від натертостей погано загоюються, а лейкопластр не зручний та важко відклеюється, травмуючи рану.

Гідрогелевий пластр «Друга шкіра» (2nd Skin) – зручний у використанні, захищає ноги від тертя та тиску і знижує ймовірність утворення пухирів та подразнення шкіри. Завдяки перфорованій гелевій основі, яка на 95% складається з очищеної води, пластр утворює надійний рухомий бар'єр між шкірою та взуттям та дозволяє шкірі «дихати».



- ✓ Сприяє швидкому загоєнню ран
- ✓ Економічна велика упаковка

- ✓ Запобігає утворенню мозолів
- ✓ Зменшує біль при натертостях
- ✓ Створює надійний бар'єр між шкірою та взуттям



Код	Назва	Штук в упаковці	Розмір в см
PO 112	Гідрогелевий пластр - круглі	48	7,5
PO 118	Гідрогелевий пластр - квадратні	200	2,5

Гідрогелевий пластр «Друга Шкіра» (2nd Skin)

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ



Вдома

для попередження та швидкого загоєння мозолів, пухирів; для швидкої допомоги при дрібних опіках та ранах.



В спорті

з метою профілактики травмування шкіри ніг при носінні тісного взуття та підчас функціонального тейпування. Велика упаковка є економічною, а гелевий пластр зручно розрізається на потрібні форми.



В походах та екскурсіях

дозволить продовжити мандрівку.



В клініках та пунктах першої допомоги

як складова аптечки першої допомоги.



В косметичних салонах

після процедури пілінгу, для захисту уразливої шкіри від тертя.

ІНСТРУКЦІЯ



1.

Відріжте стрічку гідрогелю потрібного розміру



2.

Зніміть синю плівку



3.

Нанесіть гелю на шкіру



4.

На рухомих частинах тіла зафіксуйте гідрогелевий пластр кінезіологічним тейпом



5.

Після зняття прозорої плівки гідрогелевий пластр варто змочити холодною водою для комфортного видалення

